

BaliHaler

حجرة الاستنشاق  
باليهالير

BaliHaler

Nouvelle chambre  
d'inhalation  
compacte  
pratique, adaptée  
à tous les aérosols



يستعمل على كل الرذيدات. سهل الاستعمال و الصيانة

Petit de taille ,facile à emporter, aide à une bonne observance du traitement pratique pour l'asthmatique actif ou simplement soucieux de ne pas s'encombrer inutilement



chambre d'inhalation adaptée à l'évolution des aérosols

Les aérosols modernes contiennent le gaz propulseur HFA qui a pour effet un nuage d'aérosols plus petits. Les chambres d'inhalation à grand volume ne sont par conséquent plus nécessaires



شركة ريسبير سود مطهرات قابس الجمهورية التونسية  
Respir - Sud, Morech - Gabes - Tunisie  
GSM: 00216 29 337 833 - 00216 97 890 348  
Tél-Fax: 00216 75 276 685

باليهالير متوفر في خمسة اشكال

باليهالير قمع صغير للرضيع (اقل من تسعة اشهر)

باليهالير قناع متوسط (طفل بين تسعة اشهر و خمسة سنوات)

باليهالير بدون قناع (لكل الاعمال ما بعد سن السادسة)

باليهالير قناع كبير (للكهول)

باليهالير للمريض ذات التهيجات المتعددة (احمر - اخضر)

BaliHaler nourissons(avec petite masque) de 0 à 9 mois



(Geriatrique (avec grand masque



BaliHaler ( sans masque) por tous les patients de plus de 6 ans



BaliHaler (avec masque moyen) de 9 mois à 5 ans



BaliHaler exacérbateur (en double; marquage vert et rouge)



Les cinq versions de BaliHaler

Nourrissons de 0 à 9 mois ( avec petite masque)

Bébé et enfants de 9 mois à 5 ans ( avec masque moyen)

Geriatric (avec grand masque)

pour tous patients de plus de 6 ans ( sans masque)

Exacérbateur ( en double; marquage vert et rouge)

Mode d'utilisation

Enlever le capuchon de protection du spray  
Secouer le spray afin d'agiter le contenu

خض الرشاش و اضع الغطاء  
الواقى  
خضض الرشاش لخلط محتواد



طريقة الاستعمال

Après avoir verifié que votre BaliHaler est propre  
et sec.Placer le spray à l'arriere de BaliHaler

بعد ان تاكد من ان بالي هالير  
تقفيف و جاف  
نضع الرشاش خلف جهاز باليهالير



Mettre l'embout de BaliHaler dans la bouche  
Actionner le spray  
Respirer profondément 3 à 5 fois

شغل الرشاش ادخال طرف  
بالي هالير في فمك  
استنشق بعق 3 اشكرات



En cas d'utilisation du masque.Tenir le masque  
plaqué sur la face et englobant le nez et la bouche

في حالة استخدام القناع  
عند قناع على الوجه بما فيها ما خلفه القناع



Entretien de BaliHaler

عند الاستعمال الاول يجب شطف باليهالير بالماء  
تاكد من ان باليهالير نظيف و جاف

صيانة باليهالير



Détacher les deux embouts



Laisser tremper dans l'eau tiède avec un  
détergent pendant 15 minutes environ



Secouer BaliHaler. NE PAS RINCER  
NE PAS ESSUYER...laisser sécher



Remettre les embouts quant ils  
sont complètement secs

BaliHaler doit être nettoyé toutes les semaines يجب تنظيف باليهالير كل اسبوع

BaliHaler

Originale,compact,démontable,pratique pour le nettoyage

باليهالير

حجرة الاستنشاق

Grâce à BaliHaler, la pénétration pulmonaire du médicament contenu dans le spray est multipliée par dix en moyenne.L'efficacité du traitement sera donc plus grande. BaliHaler est pratique et économique. Une meilleure pénétration pulmonaire réduit la dose quotidienne de médicament. sans latex et sans phénol

BaliHaler présente plusieurs avantages

Elle est très petite et discrète : seulement 14 centimètres de long. Sa forme est étudiée pour y loger le spray lors du transport. Elle s'adapte sur tous les aérosols doseurs disponible en Tunisie. Elle est de fabrication locale et la moins chères du marché.

Un clic retentit lorsque le patient inspire trop brutalement. BaliHaler est très pratique pour l'asthmatique actif ou simplement soucieux de ne pas s'encombrer inutilement.

Les Indications de BaliHaler :

- 1) Les asthmatiques ayant des problèmes de synchronisation main-inhalation
- 2) Les asthmatiques âgés
- 3) Tous les asthmatiques en crise
- 4) Les asthmatiques n'aimant pas le goût de certains médicaments
- 5) Les patients qui développent des candidoses orales ou des dysphonies avec l'usage de corticoïdes

باليهالير يزيد في نجاعة علاجك تساعد حجرة الاستنشاق باليهالير على استعمال الرذيدات بطريقة مثلي إذ أنها تضاعف بقدر عشرة مرات من نسبة توغل الهواء المتوفر داخل الرذيدة في الرئتين بدون "الكس" و"فينول"



Le masque gériatrique permet de satisfaire les patients invalidée par une affection compromettant l'occlusion buccale(paralysie faciale)



BaliHaler, démontable pratique pour le nettoyage

La majorité des patients ne suivent pas les directives pour le nettoyage des chambres d'inhalation. Les enquêtes auprès des jeunes patients admis pour exacerbation asthmatique ; montrent que seule une minorité ont nettoyé leurs appareils tel que recommandé par le Centers for Disease Control.

Ceci est vérifié dans la pratique quotidienne pour les chambres d'inhalation disponibles en Tunisie. Leur caractère encombrant et la non accessibilité de l'espace embout buccal-valve inspiratoire à son nettoyage en est la cause principale